


Auralya

EJEMPLO DE RETICULACIÓN CON
TECNOLOGÍA **DVS**

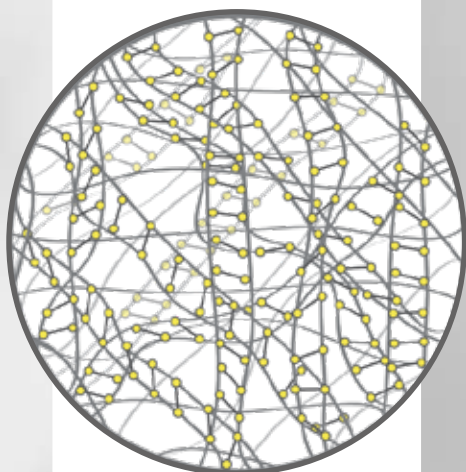


— ÁCIDO HIALURÓNICO
— AGENTE RETICULANTE (DVS)
● ENLACE QUÍMICO

ALTA CONSISTENCIA
IDEAL PARA **VOLUMINIZAR**

evanthia

EJEMPLO DE RETICULACIÓN CON
TECNOLOGÍA **BDDE**

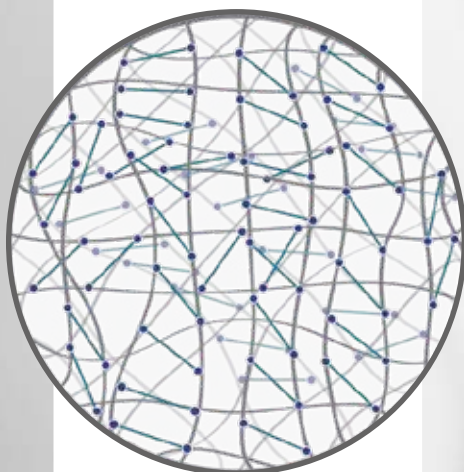

— ÁCIDO HIALURÓNICO
— AGENTE RETICULANTE (BDDE)
● ENLACE QUÍMICO

ALTA MALEABILIDAD
IDEAL PARA **REDEFINIR**

be
LIFE
GLOBAL SOLUTIONS

AURALYA® & EVANTHIA®

PURIFYsystem®

La revolución tecnológica del filler

80%

de pacientes que
encuentran la inyección
tolerable.

81%

de profesionales que no
detectan ningún efecto
adverso después del
tratamiento (quemadura,
hinchazón, edema, etc.).

89%

de pacientes están
satisfechos con los
resultados alcanzados.

LOS FILLERS DE BIOLIFE ESTETIC SON MEDICAL DEVICES CLASS III (CE 0373). EXCLUSIVAMENTE PARA USO MÉDICO.

EVANTHIA & AURALYA: DATOS TÉCNICOS



EVANTHIA 15 basic



EVANTHIA 20 medium



EVANTHIA 25 superior



AURALYA 2 medium



AURALYA 3 deep



DEFINICIÓN · VOLUMEN · MALEABILIDAD · EFECTO NATURAL · RESULTADOS DURADEROS · SIN EDEMAS NI HINCHAZÓN · SEGURIDAD · MADE IN ITALY

Código de producto	40084	40084	40085	40008	40009
Concentración de Ácido Hialurónico (mg / mL)	15	20	25	25	30
Composición	Ácido Hialurónico Reticulado (monofásico)			NO DISPONIBLE	DVS
Agente reticulante e	BDDE				
Porcentaje reticulado	100%				
Tamaño molecular	2.400 - 4.000 kDa				
Fuerza inyección	15-21 N	15-21 N	14-20 N	8-15 N	10-19 N
Viscosidad	50-70 Pa*s	50-70 Pa*s	100-125 Pa*s	70-110 Pa*s	140-170 Pa*s
Capacidad de relleno					
Cuándo debe usarse	Corrección de arrugas superficiales y peribucales (Código de barras)	Corrección de arrugas medias y peribucales. Redefinición contorno de labios.	Arrugas profundas y muy profundas. Voluminización de labio.	Remodelación de volumen facial relleno nasal.	Remodelación y restauración de grandes volúmenes. Remodelación oval, barbilla y relleno de pómulos
Profundidad de inyección	Profundidad de inyección 	Profundidad de la piel 	Profundidad de la piel 	Profundidad de la piel 	Profundidad de la piel y tejido subcutáneo 
Presentación (Blister)	2 x 1 mL				
Tipo de aguja	2 x 30G 1/2"	2 x 27G 1/2"	2 x 27G 1/2"	2 x 27G 1/2"	2 x 27G 1/2"
Duración estimada de los resultados *	Hasta 10 meses	Hasta 10 meses	Hasta 12 meses	Hasta 10 meses	Hasta 12 meses

*La duración estimada de los resultados depende de varios factores: El tipo de piel del paciente, la profundidad de la arruga a corregir, la inyección y la cantidad de área a inyectar. Las dos primeras sesiones son recomendables efectuarlas entre 4 y 6 meses para alcanzar el mejor resultado.